

## -تیلت سنچ لگن

از این وسیله به منظور اندازه گیری تیلت های جانبی و قدامی - خلفی لگن خاصره استفاده می شود. برای اندازه گیری تیلت های جانبی لگن (Down slip & Up slip) از آزمودنی می خواهیم در وضعیت ایستادن طبیعی قرار گیرد. سپس با لمس خار خاصره قدامی فوقانی لگن را شناسایی کرده و علامت گذاری می کنیم. با قرار دادن دو بازوی تیلت سنچ بر روی نقاط علامت گذاری شده می توان میزان انحرافات جانبی لگن را بر اساس درجه شیب سنچ مشخص کرد.

همچنین برای ارزیابی تیلت های قدامی و خلفی لگن ابتدا نقاط اناتومیک مورد نیاز که خار خاصره قدامی فوقانی (ASIS) و خار خاصره خلفی فوقانی (PSIS) می باشد را شناسایی و علامت گذاری می کنیم. سپس یک بازوی تیلت سنچ را بر روی ASIS و بازوی دیگر را بر روی PSIS قرار می دهیم. میزان درجه نشان داده شده در تیلت سنچ را ثبت می کنیم.

